

# BENUTZERHANDBUCH


## Verstellbarer Gehstock aus Aluminium mit Sitz

Produktcode: SeatTim



### 1. Eigenschaften

Der Gehstock mit Sitz besteht aus einem ergonomischen Handgriff, einem hochwertigen Aluminiumschaft und einer rutschfesten Gummispitze. Ausgestattet mit einem auf drei Beinen gestützte Sitz, der dem Benutzer ein sicheres und bequemes Sitzen ermöglicht. Dank der Höhenverstellung ist er sehr praktisch für den täglichen Gebrauch.

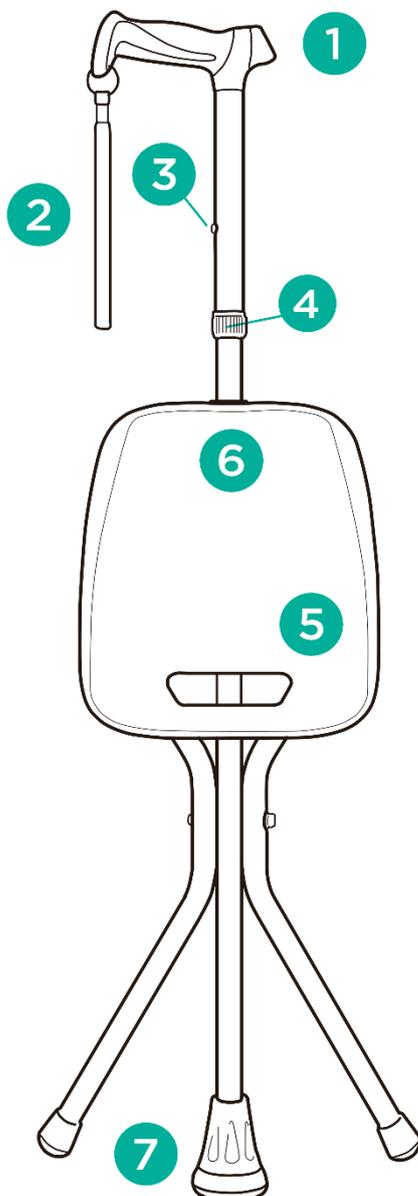

1. Handgriff
2. Handschlaufe
3. Höhenverstellung
4. Verstellsperrung
5. Sitzgriff
6. Druckbereich
7. rutschhemmende Gummispitze

## 2. Anwendung

Der Gehstock ist ein Hilfsmittel, das bei Patienten mit eingeschränkter Mobilität zur Vergrößerung der Stützfläche verwendet wird. Er wird auch Patienten empfohlen, die beim Gehen Hilfe und Unterstützung benötigen, und kann auch als Hilfe zur Erhaltung des Gleichgewichts nach Verletzungen der unteren Gliedmaßen oder des Rumpfes verwendet werden.

**Kontraindikationen:** Koordinations- und Gleichgewichtsstörungen, fortgeschrittene rheumatische Veränderungen, Verletzungen und Funktionsstörungen der oberen Extremitäten, die den Benutzer daran hindern können, sich auf den Stock zu stützen.

## 3. Einstellung

- Um den Stock einzustellen, schrauben Sie die Einstellsperre ab und drücken Sie den Feststellstift. Wählen Sie die passende Länge und den Feststellstift aus, und ziehen Sie anschließend die Einstellsperre fest. Der Stock ist in 2,5 cm Schritten einstellbar.
- Um den Sitz auszuklappen, greifen Sie den Sitzgriff und ziehen Sie ihn nach oben. Drücken Sie auf der gegenüberliegenden Seite (Druckbereich) auf den Sitz, um sicherzustellen, dass er vollständig ausgeklappt ist.
- Zum Falten wiederholen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
- Um die richtige Länge des Stocks einzustellen, stehen Sie aufrecht und beugen Sie die oberen Gliedmaßen im Ellbogengelenk in einem Winkel von 20°.
- Der Gehstock sollte individuell auf den Benutzer eingestellt sein, sodass sich der Handgriff auf Höhe des Hüftgelenks befindet.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Stock stabil ist und der Verriegelungsstift vollständig durch das Einstellloch des Stocks ragt.

**HINWEIS!** Bei Zweifeln bezüglich der Bewegungstechnik mit Stock wenden Sie sich an eine Person mit den entsprechenden Kenntnissen oder Qualifikationen.

## 4. Technische Daten

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Stock Typ        | verstellbar , mit Sitz |
| Höhe Einstellung | 86-96 cm               |

|                |         |
|----------------|---------|
| Max. Kapazität | 159 kg  |
| Gewicht        | 1 kg    |
| Farbe          | Schwarz |

## 5. Hinweise

**Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Produkts, die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und den Missbrauch.**

## 6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie den Stock nur mit Wasser und milden Reinigungsmitteln und trocknen Sie ihn gründlich ab.
- **Verwenden Sie keine** scharfen Reinigungsmittel, Scheuermittel, Bleichmittel, Benzin oder Lösungsmittel (dies kann zu Rahmenschäden, sichtbaren Mängeln und in der Folge zum Verlust der Garantierechte führen).
- Es wird empfohlen, die Gummispitze regelmäßig zu überprüfen. Ersetzen Sie abgenutzte Spitzen umgehend.

## 7. Lager und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

## 8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

## 9. Etiketten

|   |                |   |            |
|---|----------------|---|------------|
|  | Referenznummer |  | Hersteller |
|---|----------------|---|------------|

|   |   |   |                                  |
|---|---|---|----------------------------------|
|  | LOT Nummer  |  | Herstellung Datum                |
|  | Seriennummer  |  | Medizinprodukt                   |
|  | Notiz   |  | Bitte Lesen Sie die<br>Anleitung |
|  | Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der<br>grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte. |   |                                  |

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: [www.timago.com](http://www.timago.com).

Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



## Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



01/2025 (II)