

BENUTZERHANDBUCH

Dusch- und Toilettenstuhl

Produktcode: Movano



1. Eigenschaften

Der Dusch- und Toilettenstuhl besteht aus strapazierfähigem PP (Polypropylen). Er verfügt über höhenverstellbare Aluminiumbeine mit rutschfesten Gummikappen. Die Einstellung ermöglicht eine Anpassung an die individuellen Bedürfnisse des Patienten. Rückenlehne und Sitz sind mit weichen, abnehmbaren Kissen ausgestattet. Seitliche Armlehnen erhöhen die Stabilität und Sicherheit. Der Stuhl ist mit einem leicht ausziehbaren Sanitärbehälter mit Deckel ausgestattet.

Lieferumfang: Sitzrahmen, Rückenlehne, Armlehnen (2 Stk.), Beine mit Kappen (4 Stk.), Sitzkissen, Rückenkissen, Sanitärbehälter mit Deckel.

Elemente des Toilettenstuhls:

- A. Rückenlehne
- B. Rückenkissen
- C. Armlehne
- D. Sitzkissen
- E. Sitzrahmen
- F. Bein
- G. Rutschfeste Kappe
- H. Sanitärbehälter



2. Anwendung

Der Dusch- und Toilettenstuhl ist ein Hilfsmittel, das dem Benutzer hygienische Tätigkeiten erleichtert. Er wird für Personen mit eingeschränkter Mobilität empfohlen, deren Funktionsstörungen oder Bewegungseinschränkungen die selbstständige Durchführung alltäglicher Aktivitäten erschweren oder

verhindern. Der Stuhl erfüllt dank des unter dem Sitz befindlichen Sanitärbehälters eine Toilettenfunktion. Er erleichtert die täglichen physiologischen und pflegerischen Tätigkeiten des Nutzers. Der Stuhl wird außerdem für die Nutzung in Duschen und Bädern empfohlen – sowohl im häuslichen als auch im klinischen Umfeld.

3. Montage, Einstellung und Verwendung

AUSKLAPPEN

Schritt 1: Drehen Sie den Stuhlrahmen um und stecken Sie die Beine in die Montageöffnungen. Die Beine besitzen Verriegelungsstifte – drücken Sie den Stift hinein, bevor Sie das Bein einsetzen, und verriegeln Sie es anschließend.

Schritt 2: Stellen Sie die Höhe der Beine mithilfe der Verstellstifte ein.

Schritt 3: Drehen Sie den Stuhl wieder aufrecht und stellen Sie ihn auf den Boden. Hinweis: Alle vier Beine müssen auf die gleiche Höhe eingestellt sein und sicher auf dem Boden stehen.

Schritt 4: Stecken Sie die Rückenlehne in die Montageöffnungen des Sitzrahmens (Arretierung).

Schritt 5: Stecken Sie beide Armlehnen in die Montageöffnungen des Sitzrahmens (Arretierung).

Schritt 6: Setzen Sie den Sanitärbehälter mit Deckel in die Öffnung des Sitzrahmens ein.

Schritt 7: Befestigen Sie das Rückenkissen in den Montageöffnungen der Rückenlehne (3 Clips).

Schritt 8: Legen Sie das Sitzkissen auf den Stuhl – die Form erleichtert das Auflegen.

HÖHENVERSTELLUNG

Um die Höhe des Stuhls einzustellen, drücken Sie die Verstellstifte an den Beinen, wählen Sie die gewünschte Höhe und verriegeln Sie diese. Die Beine sind in 2,5-cm-Schritten verstellbar.

Hinweis: Alle Beine müssen auf der gleichen Höhe eingestellt sein und fest auf dem Boden stehen.

VERWENDUNG

Heben Sie das Sitzkissen an und entfernen Sie den Deckel des Sanitärbehälters. Nach Gebrauch den Behälter wieder abdecken und das Sitzkissen zurücklegen. **Hinweis!** Denken Sie daran, den Sanitärbehälter nach jeder Nutzung zu entleeren.

4. Technische Daten

Gesamtbreite	56 cm
Gesamttiefe	48 cm
Rückenlehnenhöhe	35 cm
Sitzhöhe vom Boden	41-53 cm
Gesamthöhe vom Boden	79-88 cm
Sitzmaße	46 cm x 43 cm
Gewicht	5,1 kg
Maximale Belastbarkeit	150 kg
Farbe	grau

5. Hinweise

Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für unsachgemäße Verwendung des Produkts, Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften oder Missbrauch.

6. Wartung

Führen Sie regelmäßige Wartung des technischen Zustands des Stuhls durch:

- Reinigen Sie den Toilettenstuhl regelmäßig nur mit Wasser und milden Reinigungsmitteln. Gründlich trocknen.
- Verwenden Sie keine starken Poliermittel, Reinigungsmittel, Scheuermittel, Bleichmittel, Benzin oder Lösungsmittel (kann den Rahmen beschädigen, sichtbare Mängel verursachen und zum Garantieverlust führen).
- Entleeren und desinfizieren Sie nach jeder Nutzung den Sanitärbehälter und den Toilettensitz.










7. Lagerungs- und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direkter Sonneneinstrahlung, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

8. Garantieinformationen

Alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte sind durch eine Garantie abgedeckt. Die Garantiebedingungen finden Sie in der Garantiekarte auf unserer Website. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bewahren Sie den Kaufbeleg (Rechnung oder Quittung) für eventuelle Garantieansprüche auf.

9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	Chargennummer		UDI-Code
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Hinweis		Bitte lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller hat die Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen für Medizinprodukte überprüft.		

Unsere komplette Produktlinie ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich. Erfahren Sie mehr unter: www.timago.com. Vielen Dank, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



12/2025(I)